

CASMARΛ

PROFESSIONAL
ADVANCED
TECHNOLOGY

PROTOCOLOS BIOLÓGICOS



CASMARΛ

PROFESSIONAL
ADVANCED
TECHNOLOGY

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
¿QUÉ ES MICRONEEDLING?	4
ACTIVATOR PEN	6
¿QUÉ SON LAS AMPOLLAS BIOLÓGICAS?.....	8
EXOSOMES COLLAGEN LIFT	10
INSTAWHITE+	12
AGE REVERSE	14
RADIANCE VITAMIN	16
PROTOCOLO	18
PLANES DE BELLEZA FACIALES	18



El ritmo de vida actual cada vez más acelerado, en el que se busca aprovechar cada minuto, hace que busquemos tratamientos estéticos que aporten **resultados muy eficaces en tiempo récord**.

Existe una demanda creciente de protocolos que sean capaces de aportar resultados muy visibles, que puedan aplicarse de forma sencilla y confortable, sin alterar el ritmo de vida diario y sin alterar nuestro aspecto.

Para responder a esta demanda, **Casmara**, dentro de su nueva categoría: PROFESSIONAL ADVANCED TECHNOLOGY, **presenta una línea de protocolos biológicos altamente concentrados para utilizar en sinergia con la técnica de microneedling estético**.


Los BIOLOGICAL PROTOCOLS de **Casmara** abordan los principales problemas estéticos y signos de la edad en rostro, obteniendo resultados eficaces desde la primera sesión.

Además, **Casmara** acompaña el producto con la última tecnología en aparatología de microneedling estético, **ActivatorPEN**, la **nueva generación de dispositivo** con sistema de alimentación autónoma de producto. Este nuevo sistema permite **facilitar la aplicación del producto y aumentar la comodidad de la profesional que aplica el tratamiento, mejorando notoriamente su trabajo**.

¿QUÉ ES MICRONEEDLING?

El microneedling estético es una técnica de aparatología que utiliza un dispositivo de microagujas para realizar una estimulación superficial y controlada de la piel, contribuyendo a mejorar visiblemente la textura y apariencia desde las primeras sesiones mediante la combinación de dos procesos:

- Por un lado, **se generan microcanales temporales en la capa superficial de la piel**, que pueden favorecer una respuesta cutánea que se asocia con procesos naturales de renovación, traduciéndose con el tiempo en una mejora visible de la textura y el aspecto general.
- Por otro lado, la técnica permite una **aplicación más eficiente y uniforme de los productos tópicos durante la sesión**, ayudando a realzar los beneficios visibles en la piel cuando se usa de forma complementaria.

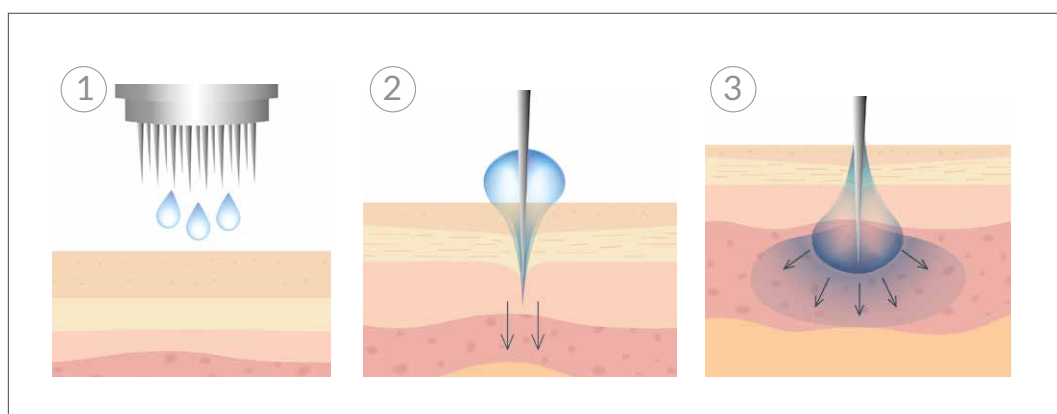

¿Para quién está indicado?

Esta técnica está especialmente indicada para pieles que buscan un paso más en sus tratamientos estéticos, queriendo obtener resultados muy eficaces mediante técnicas mínimamente invasivas, diseñadas para favorecer una buena experiencia post-tratamiento.



RESULTADOS

- ☑ Ayuda a **mejorar visiblemente la apariencia de la piel**, aportando una mayor elasticidad y firmeza.
- ☑ Contribuye a **suavizar el aspecto de líneas de expresión** y signos visibles de envejecimiento.
- ☑ Ayuda a **mejorar la uniformidad del tono de la piel** y el aspecto de pequeñas irregularidades.
- ☑ **Mejora la apariencia** de zonas con textura irregular.
- ☑ Ayuda a **mejorar visiblemente la apariencia de los poros**.
- ☑ Puede **complementar rutinas cosméticas** destinadas a tonificar el cuero cabelludo.
- ☑ **Favorece la distribución homogénea de los productos** cosméticos aplicados durante la técnica

ACTIVATOR PEN

Casmara presenta en exclusiva **ActivatorPEN**, la nueva generación de dispositivo de micro-needling estético con sistema de alimentación autónoma de producto.

CARACTERÍSTICAS:

- Tecnología de **PUNCIÓN VERTICAL** que genera punciones limpias y seguras.
- Sistema de **ALIMENTACIÓN AUTÓNOMA** de producto.
- Cuatro **CABEZALES DESECHABLES** a elegir: 12 agujas y 36 (facial), 42 (corporal), nano (pigmentos faciales).
- **5 VELOCIDADES REGULABLES** (5.500, 6.500, 7.500, 8.500, 9.500 rpm).
- **PROFUNDIDAD CONTROLADA Y REGULABLE:** Facial (0.2-0.5mm), corporal (0.2-1mm).
- **INALÁMBRICO:** 2 h de carga y 2-3 horas de autonomía en funcionamiento.

Gracias a las diferentes opciones de cabezales, velocidad y profundidad regulables se puede personalizar al máximo el protocolo según las necesidades del cliente.

El exclusivo sistema de alimentación autónoma de **ActivatorPEN** libera el producto de manera uniforme durante la técnica.



Incorpora una jeringuilla en la parte superior del dispositivo donde se introduce el producto y permite a la profesional controlar la liberación del mismo. De esta forma **se favorece una correcta distribución del producto durante el tratamiento estético.**

Con otros dispositivos que encontramos en el mercado el producto se aplica manualmente de dos formas:

- ☑ **Previo a la aplicación del dispositivo de microagujas en el rostro:** se desaprovecha mucho producto ya que éste se comienza a absorber y se dispersa en la piel antes de realizar el tratamiento
- ☑ **Aplicando el producto por zonas:** tiene el inconveniente de que requiere el uso de las dos manos simultáneamente para llevar a cabo el procedimiento. Con una de ellas se aplica el producto y, con la otra, se realiza la técnica de microneedling estético de forma controlada.



Con el sistema autónomo de **ActivatorPEN** resolvemos estos dos inconvenientes: **se aprovecha todo el producto para obtener resultados óptimos**, a la vez que **aumentamos la comodidad** de la profesional que aplica el tratamiento, optimizando notoriamente su trabajo.



¿QUÉ SON LAS AMPOLLAS BIOLÓGICAS?

Son **fórmulas concentradas** que han sido especialmente diseñadas para su aplicación en combinación con la técnica estética de microneedling.

No contienen excipientes adicionales como conservantes o perfume y son estériles para eliminar el riesgo de infección y garantizar la seguridad de la aplicación transcutánea que requiere esta técnica.

Casmara ofrece protocolos biológicos *anti-age* que, en sinergia con la técnica de microneedling estético, ayudan a mejorar los principales signos del envejecimiento en la piel con resultados percibidos desde la primera sesión.

Formulados con una alta concentración de ingredientes activos para garantizar una respuesta óptima de la piel.

Exosomes Collagen Lift PROTOCOLO RENOVADOR REAFIRMANTE CON EXOSOMAS.



Mejora los procesos de renovación, aumenta significativamente la síntesis de colágeno y elastina, transformando visiblemente la textura y firmeza de la piel. Indicado para todo tipo de piel que desee reforzar la estructura cutánea desde el interior, mejorar la densidad y elasticidad y devolverle un aspecto más joven y saludable.

Instawhite+

PROTOCOLO
DESPIGMENTANTE
Y ACLARANTE.



Reduce el tamaño y color de las manchas unificando el tono de la piel. Indicado para pieles que presentan alteraciones de la pigmentación.

Age Reverse

PROTOCOLO
REJUVENECEDOR GLOBAL.



Devuelve a la piel su elasticidad, firmeza y vitalidad, borrando los efectos del paso del tiempo. Indicado para pieles que buscan la excelencia en un tratamiento anti-age que aborde todos los signos de la edad de forma global.


Radiance Vitamin

PROTOCOLO VITAMÍNICO
ILUMINADOR Y
ANTIOXIDANTE.



Ilumina intensamente el rostro y previene el fotoenvejecimiento. Acción antifatiga. Indicado para pieles apagadas que desean recuperar el tono y el resplandor propio de la piel joven.

Exosomes Collagen Lift

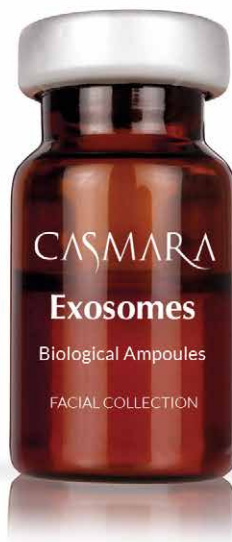

• ¿QUÉ ES?

Protocolo renovador reafirmante con **exosomas de Rosa Damascena**.

Concentrado de última generación formulado con exosomas enriquecidos en *small RNAs* derivados de células madre de Rosa Damascena. Esta innovación actúa como una señal inteligente que activa los procesos de renovación, síntesis de colágeno y elastina, transformando visiblemente la textura y firmeza de la piel.

Desarrollado para potenciar protocolos con dermapen o microneedling estético, este vial maximiza la acción y biodisponibilidad de sus activos, acelerando la renovación celular.

• ¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?

Especialmente diseñado para pieles maduras y/o desvitalizadas que buscan rejuvenecer de forma visible, mejorar la densidad, firmeza y elasticidad de la piel.

• ACTIVOS



EXOSOMAS DE ROSA DAMASCENA: de acción renovadora antiedad. Activa la juventud de la piel, actuando sobre los signos visibles del envejecimiento. Estimula significativamente la renovación celular y la síntesis de colágeno y elastina, reduciendo la apariencia de las arrugas. (Incrementa la síntesis de colágeno +10 % tras solo 24 horas*)

*Test de eficacia de ingredientes activos.



PEPTIDE TENSE: Péptido de efecto tensor que actúa suavizando las arrugas de expresión. Además, promueve el colágeno, ayudando a mejorar las llamadas arrugas cronológicas y reduce en un -14 % (*) la liberación de sustancias responsables de la contracción facial, aportando un efecto lifting.

*Test de eficacia de ingredientes activos.

• ¿CUÁNDO APLICARLO?

Para obtener resultados óptimos se recomiendan **4 sesiones de microneedling estético**, con intervalos de 7-15 días entre las sesiones bajo criterio profesional.

Para potenciar los resultados, este protocolo se puede combinar con los tratamientos profesionales antiedad de Casmara: **Q10 Rescue, Infinity, Age Defense, Ocean Miracle y RGnerin**.


Se recomienda no exponerse al sol mientras se realiza el protocolo y hasta una semana después.

• RESULTADOS

- Mejora de la densidad dérmica gracias a la estimulación de la síntesis de colágeno estructural (+90 % aumento en la expresión génica de colágeno y +60 % de elastina*). *Test de eficacia de ingredientes activos.
- Mejora de la elasticidad y firmeza en pieles maduras o desvitalizadas.
- Reducción progresiva de arrugas, líneas de expresión finas y flacidez.
- Ayuda a proteger la piel de los efectos nocivos de la radiación UV y de las agresiones ambientales.

El resultado es un rostro renovado, tonificado y rejuvenecido visiblemente desde las primeras sesiones.

Instawhite+

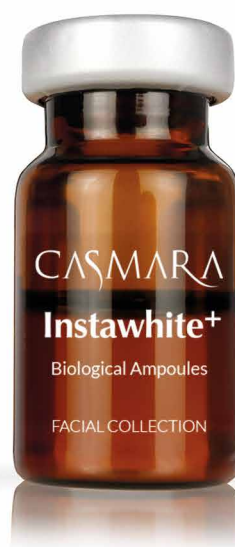

• ¿QUÉ ES?

Protocolo **despigmentante y aclarante** que reduce la apariencia de las manchas y unifica el tono de la piel.

Combinación de numerosos ingredientes activos aclarantes y despigmentantes que actúan en sinergia unificando el tono de la piel y atenuando el tamaño y color de las manchas.

Contiene, además, activos antioxidantes y fotoprotectores que ayudan a proteger la piel frente al fotoenvejecimiento y previenen la futura aparición de manchas.

• ¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?

Protocolo unisex especialmente formulado para pieles de cualquier edad que presenten irregularidades visibles en el tono cutáneo, como manchas difusas, localizadas o una apariencia desigual.

ACTIVOS

Cóctel de activos que actúan en sinergia sobre los diferentes factores cosméticos asociados a las irregularidades del tono cutáneo.



ÁCIDO KÓJICO: despigmentante. Inhibe la biosíntesis de melanina, unifica el tono del rostro y mejora la apariencia de las manchas.

ÁCIDO SALICÍLICO: exfoliante. Ayuda a eliminar la capa superficial de la piel y difumina las manchas.



EXTRACTO DE RAÍZ DE MORERA BLANCA: despigmentante y antioxidante. Bloquea la biosíntesis de melanina, aclara la piel y tiene propiedades antioxidantes que la protegen.



EXTRACTO DE RAÍZ DE REGALIZ: despigmentante. Inhibe la biosíntesis de melanina y reduce la melanina presente en la piel aclarando las manchas existentes.



CHROMABRIGHT®: Bloquea la biosíntesis de melanina; además, es iluminador y fotoprotector.

RETINOL (VITAMINA A): Exfoliante y despigmentante. Ayuda a la regeneración de la piel y provoca la dispersión de la melanina.

VITAMINA E: antioxidante y fotoprotector que protege la piel y previene el fotoenvejecimiento.

¿CUÁNDO APLICARLO?

Para obtener resultados óptimos se recomiendan **4 sesiones de microneedling estético**, con intervalos de 7-15 días entre las sesiones bajo criterio profesional. El número de sesiones puede ser superior dependiendo del tipo de irregularidad pigmentaria y su intensidad visible.

Para optimizar los resultados, este protocolo se puede combinar con el tratamiento profesional **Advanced Nácar** de **Casmara**.

No se recomienda aplicarlo en la época estival. Se recomienda no exponerse al sol mientras se realiza el protocolo y hasta una semana después.

RESULTADOS

- Ayuda a reducir el tamaño y color de las manchas contribuyendo a prevenir su aparición.
- Protege de los efectos nocivos de la radiación UV y de las agresiones ambientales.
- Unifica el tono de la piel en todo el rostro.

El resultado es una reducción visible en la apariencia de las manchas, una piel uniforme y más luminosa desde la primera sesión que perdura en el tiempo.

Age Reverse



• ¿QUÉ ES?

Protocolo **rejuvenecedor global** que devuelve a la piel su elasticidad, firmeza y vitalidad natural ayudando a disminuir los signos visibles del paso del tiempo.

Poderoso cóctel de ingredientes activos que actúan de manera sinérgica ayudando a frenar y mejorar los signos visibles asociados al proceso de envejecimiento de la piel. Actúa de forma global sobre los principales signos del envejecimiento: arrugas, falta de firmeza y vitalidad.


Reafirma y redensifica, mejorando la apariencia de arrugas y a prevenir la aparición de signos de expresión (efecto *botox-like*). Ayuda a reducir y prevenir las manchas seniles y tono apagado propio de la piel madura.

• ¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?


Especialmente diseñado para aquellas pieles que buscan la excelencia en un tratamiento *anti-aging* que actúe sobre todos los signos de la edad de forma global. Indicado para ayudar a mejorar la falta de firmeza, arrugas, líneas de expresión profundas y tono apagado.

ACTIVOS

Combinación de ingredientes activos que abordan de forma conjunta todos los signos de la edad.

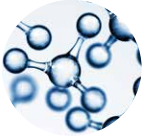

COMPLEJO DE ACTIVOS BOTOX-LIKE (SNAP-8®, LEUPHASYL® y ARGIRELINE®): disminuyen la contracción y relajan los músculos faciales reduciendo de forma significativa las líneas de expresión y previniendo su futura aparición.

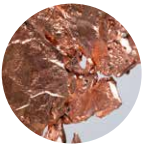


ÁCIDO HIALURÓNICO: potente hidratante. Reestructura la matriz biológica de la piel rellenando las arrugas.



ZINC Y COBRE: ambos oligoelementos desarrollan un papel fundamental en las reacciones asociadas a la síntesis y organización del colágeno y elastina en la piel.



RETINOL (Vitamina A): exfoliante que promueve a la regeneración de la piel y reduce la apariencia de arrugas y manchas seniles.

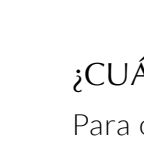

ARGININA: aminoácido que interviene en la modulación inmunológica (defensa) y en el proceso de regeneración de la piel.

VITAMINAS B (B1 y B6): antioxidantes, actúan como eliminadores de los radicales libres y protegen las células de sus efectos nocivos al mismo tiempo que revitalizan la piel.

¿CUÁNDO APLICARLO?

Para obtener resultados óptimos se recomiendan **4 sesiones de micro-needling estético**, con intervalos de 7-15 días entre las sesiones bajo criterio profesional.

Para optimizar los resultados, este protocolo se puede combinar con los tratamientos profesionales antiedad de **Casmara: Intensive Q10, Infinity, Age Defense, Ocean Miracle y RGnerin.**

RESULTADOS

- Efecto *Botox-like*: contribuye a reducir la profundidad de los surcos de expresión y la apariencia de arrugas.
- Aumenta la elasticidad de la piel y ayuda a rellenar las arrugas.
- Efecto lifting: favorece la firmeza y tersura de la piel.
- Suaviza las manchas seniles y ayuda a prevenir su futura aparición.

El resultado es un rostro visiblemente más joven desde la primera sesión.

Radiance Vitamin



• ¿QUÉ ES?

Protocolo vitamínico iluminador, revitalizante y antifatiga que ilumina intensamente el rostro y ayuda a proteger la piel frente a los efectos visibles del fotoenvejecimiento. Aporta a la piel todos los nutrientes y energía necesarios para lucir radiante.

Potente cóctel ultrarevitalizante con gran concentración de vitamina C potenciado por una dosis extra de todas las vitaminas que la piel necesita para lucir radiante. Contiene aminoácidos, minerales y coenzimas que apoyan el correcto funcionamiento de los procesos celulares cutáneos.

Aporta luminosidad, unifica el tono de la piel ayudando a minimizar los signos visibles relacionados con el envejecimiento, el cansancio y el estrés que se refleja en la piel, aportando un efecto “buena cara”. Su alta concentración de antioxidantes contribuye a proteger de los efectos negativos de las agresiones ambientales y radicales libres, ayudando a retrasar la aparición de signos visibles asociados al envejecimiento prematuro de la piel.

• ¿PARA QUIÉN ESTÁ INDICADO?

Formulado para cualquier edad, especialmente pieles apagadas y desvitalizadas que desean recuperar el tono y resplandor propio de la piel joven.

Es el protocolo ideal para lucir una piel perfecta durante un evento especial o en periodos de estrés y cansancio en los que existe una sensación de mala cara continua.

• ACTIVOS

Combinación de activos iluminadores, revitalizantes y antioxidantes que devuelven a la piel su luminosidad natural y favorecen su protección frente al fotoenvejecimiento.



VITAMINA C: activo iluminador por excelencia, aporta luminosidad a la piel y unifica el tono gracias a la sinergia de cuatro mecanismos de acción:

- Activa la producción de colágeno, por lo que alisa la piel y difumina arrugas.
- Disminuye la melanina presente en la piel, unificando el tono y aumentando la luminosidad.
- Inhibe la formación de nueva melanina por lo que mantiene la acción iluminadora en el tiempo y previene la aparición manchas.
- Su gran actividad antioxidante neutraliza los radicales libres e impide que éstos provoquen daños celulares, protegiendo las células.



VITAMINA E: antioxidante y fotoprotector. Actúa en sinergia con la Vitamina C multiplicando el efecto de ambas moléculas por separado.



VITAMINAS EL GRUPO B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8, B9 y B12): multicomplejo energizante. Ayuda a las células a conseguir la energía que necesitan para funcionar correctamente. Además, contribuye al proceso de renovación celular ayudando a retrasar el envejecimiento de la piel.



RETINOL (Vitamina A): exfoliante, ayuda a eliminar la capa superficial de la piel. Elimina impurezas y alisa la piel aumentando la luminosidad del rostro.

COMPLEJO DE AMINOÁCIDOS: contiene los 22 aminoácidos que utilizan las células para producir colágeno y la elastina ayudando a que el rostro se mantenga terso y firme.

MINERALES: resultan indispensables para el correcto funcionamiento de las células y la activación de los mecanismos de defensa de la piel frente a las agresiones externas.

COENZIMAS: son activadores bioquímicos imprescindibles para el funcionamiento de las células, y aumentan la velocidad de regeneración de la piel, ayudando a lucir una piel saludable.

ÁCIDO HIALURÓNICO: potente hidratante y rellenosador de arrugas.

• ¿CUÁNDO APLICARLO?

Para obtener resultados óptimos se recomiendan **4 sesiones de microneedling estético**, con intervalos de 7 a 15 días entre las sesiones bajo criterio profesional.

Para optimizar los resultados, este protocolo se puede combinar con los tratamientos profesionales de **Casmara: Skin Sensations, Q10 Rescue y Goji**.

• RESULTADOS

- Ilumina el rostro y revitaliza en profundidad.
- Favorece la renovación celular y mejora la elasticidad.
- Aporta energía y ayuda a reducir los signos visibles de cansancio en la piel.
- Protege de las agresiones ambientales y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro.

Este protocolo devuelve la luminosidad y vitalidad a la piel, proporcionándole, desde la primera sesión, un aspecto radiante.



PROTOCOLO

01

LIMPIADOR
DEEP CLEANSING
MULTIFUNCTIONAL
3 IN 1

**02**

APLICAR AMPOLLA
BIOLÓGICA MEDIANTE
TÉCNICA MICRONEEDLING
ESTÉTICO

**03**

WHITE GOLD MASK

**04**

APLICAR CREMA CON
PROTECCIÓN SOLAR
SPF50



¿CÓMO SE REALIZA EL PROTOCOLO?

01

Desmaquillar bien el rostro del cliente con **Deep Cleanser Multifunctional 3 in 1** de **Casmara**. Al ser un 3 en 1 desmaquilla, limpia y tonific, a dejando la piel perfectamente preparada para el protocolo.

Limpia suavemente pero de forma efectiva, respetando al máximo y sin alterar el equilibrio natural de la piel.

02

Aplicar la técnica de microneedling estético con la ampolla biológica seleccionada, como se describe en los apartados anteriores.

03

Finalizar el protocolo con una máscara **Algae Peel-Off White Gold** de **Casmara**. Una máscara recuperadora efecto hielo a base de oro, árnica y bisabolol, que consigue descender hasta 8 °C la temperatura de la piel, para una acción recuperadora inmediata. Está especialmente recomendada para el cuidado cosmético post procedimientos médico-estéticos.

Otra opción recomendable es la máscara **Sensitive Mask 2040**. Esta máscara contiene extracto de violetas y avena, conocidas por sus grandes propiedades suavizantes y un alto contenido de vitaminas A, B y E que hacen que sea perfecta para aportar sensación de comfort a la piel y refrescar el rostro después del protocolo.

04

Retirar la máscara y aplicar **Clarifying Anti-aging Cream SPF 50** o cualquier otra crema con protector de protección solar 50, como **Photoaging control Gel Cream SPF 50** o **Retinol Proage Renewal Day Cream SPF 50**, para proteger el rostro de la radiación solar.

Es muy importante proteger el rostro con cremas de alto SPF durante los días posteriores al protocolo.

PLAN DE BELLEZA

Exosomes Collagen Lift



CALENDARIO DE APLICACIÓN AVANZADA

Cuidado en CENTRO DE BELLEZA

Se recomienda empezar el plan de belleza **Exosomes Collagen Lift** con una sesión del tratamiento **Purifying** que ayudará a preparar la piel, eliminando las impurezas acumuladas, dejándola intensamente purificada. Su acción potenciará los efectos del tratamiento aplicado a continuación. 3 días después realizaremos la 1ª sesión de microneedling estético con la ampolla **Exosomes Collagen Lift**.

SEMANA	L	M	X	J	V	S	D	
1	Tto. Purifying			Exosomes Collagen Lift (Activator Pen)				PREPARACIÓN PIEL + 1ª ses. Microneedling estético
2	Tto. monodosis							POTENCIADOR RECUPERADOR
3	Tto. monodosis							
4				Exosomes Collagen Lift (Activator Pen)				2ª ses. Microneedling estético
5	Tto. monodosis							POTENCIADOR RECUPERADOR
6	Tto. monodosis							
7				Exosomes Collagen Lift (Activator Pen)				3ª ses. Microneedling estético
8	Tto. monodosis							POTENCIADOR RECUPERADOR
9	Tto. monodosis							
10				Exosomes Collagen Lift (Activator Pen)				4ª ses. Microneedling estético
11	Tto. monodosis AgeDefense							POTENCIADOR RECUPERADOR
12	Tto. monodosis AgeDefense							

En las dos semanas siguientes, mientras la piel se encuentra en proceso natural de renovación posterior a la aplicación del tratamiento, Casmara recomienda potenciar la acción renovadora reafirmante con un tratamiento monodosis.

La profesional determinará que tratamiento es el más adecuado en función del estado de la piel del cliente.

- **INFINITY:** potente tratamiento rejuvenecedor con tecnología Neurocosmética, Genómica y Epigenética.
- **OCEAN MIRACLE:** tratamiento anti-edad reafirmante 100% natural con agua de mar y biotecnología marina.
- **RGNERIN:** tratamiento antiedad regenerador efecto “botox-like” y texturas enriquecidas.

Se recomienda repetir en las semanas posteriores el mismo ciclo. Es importante que se respeten los tiempos de renovación/restablecimiento del comfort de la piel dejando 1 o 2 semanas entre sesión y sesión de microneedling estético.



CALENDARIO DE APLICACIÓN

Cuidado en domicilio



CUIDADO DE DÍA:

Aplicar la crema de uso diario asociada al tratamiento renovador reafirmante elegido, sobre rostro y cuello, previamente limpios. Paso imprescindible para potenciar la acción de los activos aplicados en el tratamiento y conseguir unos resultados eficaces; ya que los activos de la crema actúan en sinergia con el tratamiento profesional y las sesiones de microneedling estético mejorando su acción.

A continuación, es imprescindible aplicar la crema **Clarifying Antiaging Cream con SPF 50** o cualquier otra crema con protector de protección solar 50, como **Photoaging Control Gel Cream SPF50** o **Retinol Proage Renewal Day Cream SPF 50**, para proteger el rostro de la radiación solar; ya que después de la técnica es necesario proteger la piel frente a la radiación solar para evitar la aparición de manchas posteriores; además, sus activos antiedad avanzados potencian la acción del protocolo **Exosomes Collagen Lift**.



CUIDADO DE NOCHE:

Aplicar sobre rostro y cuello limpios unas gotas del **Superconcentrado Night Cure** con Exosomas, de efecto reparador rejuvenecedor nocturno y, a continuación, aplicar la crema de uso diario asociada al tratamiento renovador reafirmante elegido. Ritual cosmético perfecto para mejorar la elasticidad y firmeza de la piel, apoyando los mecanismos naturales de renovación y ayudando a revertir el proceso de envejecimiento cutáneo. Se recomienda seguir las mismas pautas de cuidado día/noche durante todo el plan de belleza.

PLAN DE BELLEZA

Instawhite+



CALENDARIO DE APLICACIÓN AVANZADA

Cuidado en CENTRO DE BELLEZA

Se recomienda empezar el plan de belleza **Instawhite+** con una sesión del tratamiento **Purifying** que ayudará a preparar la piel, eliminando las impurezas acumuladas, dejándola intensamente purificada. Su acción complementará los efectos de la sesión aplicada a continuación. Tres días después realizaremos la 1ª sesión de microneedling **Instawhite+**.

SEMANA	L	M	X	J	V	S	D	
1	Tto. Purifying			Instawhite+ (Activator Pen)				PREPARACIÓN PIEL + 1ª ses. Microneedling estético
2				Tto. Advanced Nácar				RECUPERACIÓN
3				Tto. Advanced Nácar				
4				Instawhite+ (Activator Pen)				2ª ses. Microneedling estético
5				Tto. Advanced Nácar				RECUPERACIÓN
6				Tto. Advanced Nácar				
7				Instawhite+ (Activator Pen)				3ª ses. Microneedling estético
8				Tto. Advanced Nácar				RECUPERACIÓN
9				Tto. Advanced Nácar				
10				Instawhite+ (Activator Pen)				4ª ses. Microneedling estético
11				Tto. Advanced Nácar				RECUPERACIÓN
12				Tto. Advanced Nácar				

En las dos semanas siguientes, mientras la piel se encuentra en proceso natural de renovación posterior a la aplicación del tratamiento, **Casmara** recomienda complementar la acción despigmentante y aclarante del protocolo **Instawhite+** aplicando el tratamiento aclarante iluminador **Advanced Nácar**.

Se recomienda repetir en las semanas posteriores el mismo ciclo. Es importante que se respete los tiempos de renovación de la piel; dejando un intervalo de una o dos semanas entre cada sesión de microneedling estético dependiendo de la piel del cliente.

ADVERTENCIA: no aplicar **Instawhite+** o **Advanced Nácar** sobre zonas micropigmentadas.



CALENDARIO DE APLICACIÓN
Cuidado en domicilio

SEMANA	L	M	X	J	V	S	D
1		☀️🌙	☀️🌙	☀️	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙
2	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙	☀️	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙
3	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙	☀️	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙
4	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙	☀️	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙
5	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙	☀️	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙
6	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙	☀️	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙
7	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙	☀️	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙
8	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙	☀️	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙
9	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙	☀️	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙
10	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙	☀️	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙
11	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙	☀️	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙
12	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙	☀️	☀️🌙	☀️🌙	☀️🌙



CUIDADO DE DÍA:

Aplicar unas gotas de **Lightening Glow Serum** sobre el rostro y cuello previamente limpios. Una fórmula desarrollada con Pigment Control Technology para combatir el tono apagado e irregular y revelar una piel más luminosa, uniforme y visiblemente revitalizada.

A continuación, es imprescindible aplicar **Clarifying Antiaging Cream con SPF 50**; ya que después de la técnica es necesario proteger la piel frente a la radiación solar para evitar la aparición de manchas posteriores; además, sus activos aclarantes e iluminadores potencian la acción del protocolo **Instawhite+**.



CUIDADO DE NOCHE:

Aplicar sobre rostro y cuello limpios el peeling **Clarifying Concentrated Serum**.

ADVERTENCIA: no aplicar el peeling los días en los que el cliente disfrute de una sesión de microneedling estético o del tratamiento **Advanced Nácar**.

PLAN DE BELLEZA

Age Reverse



CALENDARIO DE APLICACIÓN AVANZADA

Cuidado en CENTRO DE BELLEZA

Se recomienda empezar el plan de belleza **Age Reverse** con una sesión del tratamiento **Purifying** que ayudará a preparar la piel, eliminando las impurezas acumuladas, dejándola intensamente purificada. Su acción complementará los efectos del tratamiento aplicado a continuación. 3 días después realizaremos la 1ª sesión de microneedling **Age Reverse**.

SEMANA	L	M	X	J	V	S	D	
1	Tto. Purifying			Age Reverse (Activator Pen)				PREPARACIÓN PIEL + 1ª ses. Microneedling estético
2	Tto. monodosis							SINÉRGICO/ RENOVADOR
3	Tto. monodosis							
4				Age Reverse (Activator Pen)				2ª ses. Microneedling estético
5	Tto. monodosis							SINÉRGICO/ RENOVADOR
6	Tto. monodosis							
7				Age Reverse (Activator Pen)				3ª ses. Microneedling estético
8	Tto. monodosis							SINÉRGICO/ RENOVADOR
9	Tto. monodosis							
10				Age Reverse (Activator Pen)				4ª ses. Microneedling estético
11	Tto. monodosis AgeDefense							SINÉRGICO/ RENOVADOR
12	Tto. monodosis AgeDefense							

En las dos semanas siguientes, mientras la piel se encuentra en proceso natural de renovación posterior a la aplicación del tratamiento, **Casmara** recomienda complementar la acción rejuvenecedora/antiedad con el tratamiento. La profesional determinará qué tratamiento es el más adecuado en función del estado de la piel del cliente.

- **INFINITY:** potente tratamiento rejuvenecedor con tecnología Neurocosmética, Genómica y Epigenética.
- **OCEAN MIRACLE:** tratamiento anti-edad reafirmante 100% natural con agua de mar y biotecnología marina.
- **RGNERIN:** tratamiento antiedad regenerador efecto “botox-like” y texturas enriquecidas.

Se recomienda repetir en las semanas posteriores el mismo ciclo. Es importante que se respeten los tiempos de renovación/restablecimiento del confort de la piel dejando 1 o 2 semanas entre sesión y sesión de microneedling estético.



CALENDARIO DE APLICACIÓN

Cuidado en domicilio



CUIDADO DE DÍA:

Aplicar la crema de uso diario asociada al tratamiento rejuvenecedor/antiedad elegido sobre rostro y cuello, previamente limpios. Paso imprescindible para optimizar la acción de los activos aplicados en el tratamiento y conseguir resultados eficaces; ya que los activos de la crema actúan en sinergia con el tratamiento profesional y las sesiones de microneedling estético mejorando su acción.

A continuación, es imprescindible aplicar cualquiera de las cremas Casmara con **SPF 50**; ya que después de la técnica es necesario proteger la piel frente a la radiación solar para evitar la aparición de manchas posteriores; además, sus activos antiedad avanzados optimizan la acción del protocolo **Age Reverse**.



CUIDADO DE NOCHE:

Aplicar sobre rostro y cuello limpios unas gotas del **Superconcentrado Night Cure**, de efecto reparador rejuvenecedor nocturno, y a continuación aplicar la crema de uso diario asociada al tratamiento rejuvenecedor/anti-edad elegido.

Ritual cosmético perfecto para mejorar la elasticidad y firmeza de la piel, apoyando los mecanismos naturales de renovación y ayudando a revertir el proceso de envejecimiento cutáneo.

*Se recomienda seguir las mismas pautas de cuidado día/noche durante todo el plan de belleza.

PLAN DE BELLEZA

Radiance Vitamin



CALENDARIO DE APLICACIÓN AVANZADA

Cuidado en CENTRO DE BELLEZA

Se recomienda empezar el plan de belleza **Radiance Vitamin** con una sesión del tratamiento **Purifying** que ayudará a preparar la piel, eliminando las impurezas acumuladas, dejándola intensamente purificada. Su acción complementará los efectos del tratamiento aplicado a continuación. 3 días después realizaremos la 1ª sesión de microneedling estético **Radiance Vitamin**.

SEMANA	L	M	X	J	V	S	D	
1	Tto. Purifying			Radiance Vitamin (Activator Pen)				PREPARACIÓN PIEL + 1ª ses. Microneedling estético
2	Tto. monodosis							SINÉRGICO/RENOVADOR
3	Tto. monodosis							
4				Radiance Vitamin (Activator Pen)				2ª ses. Microneedling estético
5	Tto. monodosis							SINÉRGICO/RENOVADOR
6	Tto. monodosis							
7				Radiance Vitamin (Activator Pen)				3ª ses. Microneedling estético
8	Tto. monodosis							SINÉRGICO/RENOVADOR
9	Tto. monodosis							
10				Radiance Vitamin (Activator Pen)				4ª ses. Microneedling estético
11	Tto. monodosis							SINÉRGICO/RENOVADOR
12	Tto. monodosis							

En las dos semanas siguientes, mientras la piel se encuentra en proceso natural de renovación posterior a la aplicación del tratamiento, Casmara recomienda complementar la acción vitamínica iluminadora, revitalizante y antifatiga con el tratamiento **Skin Sensations o Q10 Rescue** para unos resultados extraordinarios. La profesional determinará qué tratamiento es el más adecuado en función del tipo y estado de la piel del cliente.

Los tratamientos de Casmara recomendados para combinar en este plan son:

- **SKIN SENSATIONS:** tratamiento multivitamínico, revitalizante y anti-eda. Indicado para todo tipo de piel.
- **Q10 RESCUE:** tratamiento energizante, rejuvenecedor, enriquecido con vitamina C biodisponible y aceites de alto poder nutritivo. Indicado para las pieles más exigentes y desnutridas.

Se recomienda repetir en las semanas posteriores el mismo ciclo. Es importante que se respeten los tiempos de renovación de la piel tras el tratamiento; dejando entre sesión y sesión de microneedling estético 1 o 2 semanas.



CALENDARIO DE APLICACIÓN

Cuidado en domicilio



CUIDADO DE DÍA:

Aplicar la crema de uso diario asociada al tratamiento elegido sobre rostro y cuello previamente limpios para optimizar la acción de los activos aplicados en el tratamiento y conseguir resultados extraordinarios; ya que los activos de la crema actúan en sinergia con el tratamiento profesional y las sesiones de microneedling estético mejorando su acción.

A continuación, es imprescindible aplicar la crema **Clarifying Anti-aging Cream con SPF 50**; ya que después de la técnica es necesario proteger la piel frente a la radiación solar para evitar la aparición de manchas posteriores; además, sus activos iluminadores potencian la acción del protocolo **Radiance Vitamin**.



CUIDADO DE NOCHE:

Aplicar sobre rostro y cuello limpios unas gotas del **Superconcentrado Rose D-Tox**, de efecto detoxificante-energizante, y a continuación aplicar la crema de uso diario asociada al tratamiento anti-edad vitamínico elegido.

Se recomienda seguir las mismas pautas de cuidado día/noche durante todo el plan de belleza.

CASPARA

PROFESSIONAL
ADVANCED
TECHNOLOGY

CASMARA

PROFESSIONAL
ADVANCED
TECHNOLOGY

CASMARA COSMETICS, S.A.

High Quality Professional Dermocosmetic Laboratory

www.casmara.com

casmara@casmara.com

C/ Ciutat de Llíria, nº 29 y 31
Polígono Ind. Fuente del Jarro
46988 - Paterna (Valencia) SPAIN
Tel. (+34) 961 501 999